


# ZESTAW DO POBRANIA PRÓBKI KRWI

Przed rozpoczęciem zapoznaj się dokładnie z Instrukcją pobrania próbki krwi.

Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Opakowanie zawiera:

1. **Microvette®** (próbówka do pobrania krwi)
2. **Zabezpieczony lancet** do przekłucia palca
3. **Gazik dezynfekcyjny**
4. **Plaster z opatrunkiem**
5. **Plastyczny woreczek na zużyte materiały**
6. **Plastyczny pojemnik ochronny dla próbówki**
7. **Formularz zamówienia**
8. **Instrukcja pobierania próbki krwi**

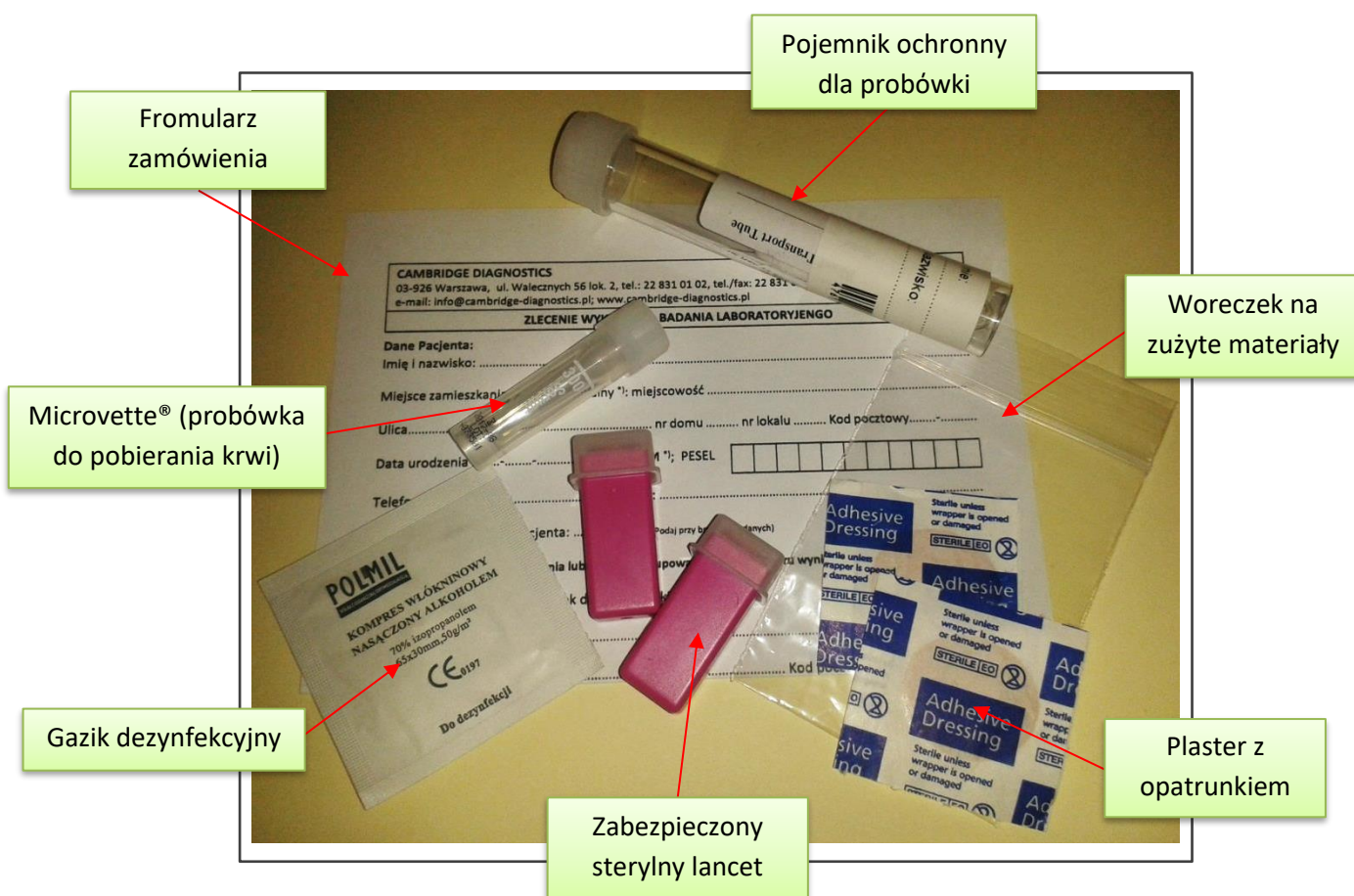

## Instrukcja pobrania próbki krwi włośniczkowej

1. Poproś pacjenta o umycie rąk w ciepłej wodzie, co zmiękczy skórę i poprawi przepływ krwi.



2. Wyjmij małą próbkę (Microvette®) z plastikowej próbki ochronnej. Z Microvette® zdejmij białą nakrętkę.

3. Wybierz palec, z którego będzie pobierana krew, oczyść gazikiem dezynfekcyjnym (zawartym w zestawie) i pozostaw do wyschnięcia.



4. Zdejmij osłonkę z lancetu (kolor lancetu może być różny).



5. Naciśnij kciukiem na opuszek palca pacjenta, z którego będzie pobierana krew, aby napiąć skórę. Następnie przyłóż do skóry czerwony koniec lancetu i delikatnie naciśnij lancet do momentu kliknięcia. Pacjent może poczuć niewielkie ukłucie w trakcie przebicia skóry.



6. Delikatnie pomasuj palec w kierunku ukłucia, aby uzyskać kroplę krwi.

7. Przeciągnij delikatnie przekuty palec po obrzeżu próbki, tak żeby krew spłynęła do środka. Powtarzaj tę czynność dopóki nie zapełnisz krwią próbki do wyznaczonej kreski. Jeśli nie jest to możliwe to przy użyciu zapasowego lancetu powtórz powyższe czynności, nakłuwając inny palec.



8. Po pobraniu próbki, nałóż z powrotem białą osłonkę na próbkę i kilkukrotnie wstrząśnij próbkę, aby krew się dobrze wymieszała.

9. Włóż próbkę do środka plastikowego pojemnika ochronnego.



10. Wypełnij załączony formularz danymi osobowymi pacjenta (imię, nazwisko, pesel, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail) oraz wpisz datę i godzinę pobrania próbki. Uzyskaj podpis pacjenta wyrażający zgodę do przetwarzania danych osobowych do celów diagnostycznych. Pozostaw dane swojej praktyki medycznej w celu przesłania wyników i wystawienia faktury. Na odwrocie oznacz, jaki test mamy wykonać i w którym języku ma zostać wydany raport.

11. Zużyty lancet umieść w foliowym woreczku (załączonym do zestawu).

12. W białym plastikowym pudełku transportowym zestawu umieść:

- Plastikowy pojemnik ochronny, w którym jest umieszczona próbka z krwią
- Obustronnie wypełniony formularz

13. Plastikowe pudełko umieść w kopercie i przekaż wraz z listem przewozowym kurierowi.